

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.

Priporočajo babice, ortodonti in pediatri. Izboljšana NUK oblika: **1** še bolj ravna, **2** še tanjša, **3** še ožja.

Navodila za uporabo: Pred prvo uporabo položite izdelek v vrelo vodo za 5 minut. Pri tem uporabite zadostno količino vode in se s tem izognite morebitnim poškodbam. Da bi zagotovili zadostno raven higijene, izdelek umijte s toplo milnico in ga pred vsako uporabo sterilizirajte. Priporočamo uporabo NUK sterilizatorja. Po končanem čiščenju ali sterilizaciji, odstranite morebiten preostanek vode in dudo v celoti posušite. Na ta način boste zagotovili higieno. Dude ne čistite v pomivalnem stroju, saj lahko pomivalna sredstva poškodujejo izdelek. Za higiensko čiščenje v mikrovalovni pečici: Vsako stran škatlice napolnite z 20ml vode in vanjo položite dudi. Zaprite škatlico in nastavite gretje na 700-1000W, pustite delovati 4 minute (upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca mikrovalovne pečice). Mikrovalovno pečico pustite zaprto še dodatnih 5 minut. **OPOZORILO!** Nevarnost nastanka opeklin lahko še traja tudi po 5 minutah. Če količina vode, čas segrevanja ali nastavljena moč mikrovalovne pečice niso pravilni, lahko to povzroči materialno škodo.

Odstranite morebitni ostanek vode. Pustite, da se dudi v celoti posuši v odprti škatlici. Pred uporabo se prepričajte, da se je cucelj v celoti ohladil. Škatlico hranite izven otrokovega dosega. Primerna samo za NUK dude. Rok trajanja: 4 leta od dneva proizvodnje - glej žig (velja, če je shranjena v suhih in higienskih pogojih, pri sobni temperaturi in zaščitena pred neposredno sončno svetlobo) **Za varnost vašega otroka: OPOZORILO!** Izdelek pred vsako uporabo preglejte (posebej, če ima otrok že zobe). Dudo povlecite v vse smeri. Zavržite ob prvih znakih poškodb ali obrabljenosti. Uporabljajte le namensko držala za dude, ki so bila testirana v skladu s standardom EN12586. Na dudo ne pritrujite drugih trakov ali vrvic, saj se lahko otrok z njimi zaduši. Izdelka ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, drugih virih toplote ali v sterilizacijski tekočini za daljše časovno obdobje oz. kot je priporočeno, saj lahko na ta način poškodujete cucelj. V nekaterih redkih primerih lahko otroci vstavijo v usta celotno dudo. V takšnem primeru NE skrbite. Zaradi posebne oblike, cuclja ne morejo pogoltniti, dve ventilacijski reži pa omogočata dotok zraka. Nežno odstranite dudo iz ust. Cuclja ne namakajte v zdravila ali sladke tekočine in ne ližite cuclja. To lahko povzroči nastanek zobne gnilobe. Dudo zavržite po eni do dvomesečni uporabi in s tem poskrbite za varnost in higieno. Tudi brez vidnih znakov poškodb, je lahko stanje cuclja slabo. Za dude s pokrovom: zaščitni pokrov hranite izven otrokovega dosega in se izognite zadužitvi.

Za cuclje iz naravnega lateksa: izdelani iz popolnoma naravnega materiala.